

## CE – Dichiarazione di conformità

### CE – Declaration of Conformity

Prodotto/product details	CE		
Prodotto/product name	Memory		
Identificazione/type	<p>Varianti Legenda codice U= variante unica</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px; vertical-align: top;">U</td> <td style="padding: 5px;">           Lastra 3 strati con uno strato in poliuretano traspirante schiumato ad acqua di alte prestazioni codice 23PP alto 7 cm produttore Vefer Spa, da uno strato in poliuretano ad alta traspirabilità cod HLC25IPPAT alto 7 cm di produzione Orsa Foam Spa e da uno strato superficiale in memory foam codice COLOR40VE alto 4 cm di produzione Giuseppe Olmo Spa, fodera tessuto Fondo Canapa, sfoderabile su 4 lati con cerniera centrale, bordino perimetrale         </td> </tr> </table>	U	Lastra 3 strati con uno strato in poliuretano traspirante schiumato ad acqua di alte prestazioni codice 23PP alto 7 cm produttore Vefer Spa, da uno strato in poliuretano ad alta traspirabilità cod HLC25IPPAT alto 7 cm di produzione Orsa Foam Spa e da uno strato superficiale in memory foam codice COLOR40VE alto 4 cm di produzione Giuseppe Olmo Spa, fodera tessuto Fondo Canapa, sfoderabile su 4 lati con cerniera centrale, bordino perimetrale
U	Lastra 3 strati con uno strato in poliuretano traspirante schiumato ad acqua di alte prestazioni codice 23PP alto 7 cm produttore Vefer Spa, da uno strato in poliuretano ad alta traspirabilità cod HLC25IPPAT alto 7 cm di produzione Orsa Foam Spa e da uno strato superficiale in memory foam codice COLOR40VE alto 4 cm di produzione Giuseppe Olmo Spa, fodera tessuto Fondo Canapa, sfoderabile su 4 lati con cerniera centrale, bordino perimetrale		
Destinazione d'uso/intended use	Materasso confortevole, per pazienti e ausilio alle terapie mediche/ / Comfortable mattress, for patients and aid in medical therapies		
Classificazione 2017/745/CEE, Allegato VIII punto 4 Classification according to 2017/745/EEC, annex VIII number 4	Classe I, per la regola 1/ class I per rule 1		
Altre classificazioni/other classing	N.A.		
Ente notificato/Notified body	N.A.		
Numero certificato/certificate number	N.A.		
Procedura di certificazioni in accordo con 2017/745/CEE/Procedure	Allegato II, Allegato III/Annex II, Annex III		

**Lordflex s.r.l.**  
Sede Legale, Uffici e Stabilimento  
Via Carrara, 11 (s.p. 360 Km. 23)  
60030 SERRA DE' CONTI (AN)  
tel. 0731 879466/7 fax 0731 878155  
www.lordflex.com info@lordflex.com  
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.  
C.C.I.A.A. Ancona REA 68070  
Reg. Imprese AN - Cod. Fisc./P.Iva 00190580423  
European Vat Identification Cod. IT00190580423



according to 2017/745/EEC	
Numero di registrazione/NSIS number	2836647
Codice GMDN/GMDN code	47520
Codice CND/CND code	Y0899
Codice Udi-Di di base – Udi-Di/Base Udi-di-Udi- di	PP1181590000817 - 112002587031
Norme armonizzate/Harmonized standards	Regolamento 2017/745/CEE/, EN 12182, EN 14971, Regolamento UE 1007/2011, UNI EN 14971, UNI EN 1957/2012, UNI EN 10707/2003
Altre norme applicate/Other standards	Altre

Il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto descritto sopra è  
in accordo con il regolamento 2017/745/CEE e successive modificazioni  
We declare under sole responsibility that the products described above are in  
compliance with regulation 2017/745/EEC.

Serra De' Conti (AN ), 03/06/2025


Lordflex's Srl

Il titolare

# MEMORY

**materassi ortopedici ed ergonomici**

**Manuale d'uso**

 Lordflex's  
Via Carrara 11  
60030 Serra de Conti (AN)



Pag. 1 di 7

# Memory

*Gentile Cliente,*

*La ringraziamo per la preferenza riservata al ns. materasso e ci auguriamo che essa possa rispondere alle Sue aspettative.*

Come cliente Lordflex's Srl Lei ha ora il privilegio di avere in ogni momento uno staff di tecnici specializzati a Sua completa disposizione.

*Per ogni Sua esigenza non esiti a contattarci con i mezzi che riterrà più idonei e opportuni; al fine di rendere più esaurienti le nostre risposte La preghiamo di citare sempre il modello ed il numero di matricola del Suo materasso.*

*La invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel presente manuale, questo Le sarà di valido aiuto per l'utilizzo ottimale e per mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche della Suo materasso.*

*Cordialmente Le auguriamo buon riposo.*

Manuale Utente

**INDICE**

1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA .....	4
3. SIMBOLI UTILIZZATI .....	4
4. DESCRIZIONE DEL MATERASSO .....	5
5. INSTALLAZIONE E USO .....	5
6. ETICHETTE .....	6
L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura:.....	6
7. PULIZIA .....	7
8. SMALTIMENTO .....	7
9. GARANZIA.....	7

## 1. AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PRIMA DI PROCEDERE ALL'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E LE SEGUENTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI



- Evitare l'esposizione a fonti di calore eccessive.
- Maneggiare con cura.
- Utilizzare il presente dispositivo soltanto in conformità alla sua destinazione d'uso, prevenzione delle piaghe da decubito e trattamento degli stati dolorosi alla schiena e alla cervicale dovuti alla postura.
- Qualsiasi manipolazione, sostituzione, intervento sul dispositivo non effettuato da personale autorizzato Lordflex's comporta la decadenza della garanzia e la non responsabilità del costruttore per danni a persone o cose che possono derivarne;
- Rimuovere la fodera di rivestimento del materasso soltanto per operazioni di pulizia/disinfezione dello stesso.

## 2. DESTINAZIONE D'USO

Il dispositivo medico oggetto del presente manuale di uso è un materasso confortevole, per pazienti e per ausilio alle terapie mediche

## 3. SIMBOLI UTILIZZATI

Nel presente manuale sono utilizzati simboli per richiamare l'attenzione dell'utente su informazioni ed osservazioni di particolare importanza, i simboli sono i seguenti:



Simbolo di Fabbriante del dispositivo medico



Conformità del dispositivo rispetto al regolamento europeo 2017/745.

## **4. DESCRIZIONE DEL MATERASSO**

### **4.1 CARATTERISTICHE GENERALI**

Il prodotto Memory è un materasso studiato appositamente per ridurre gli stati dolorosi dovuti alla postura. Sono realizzati in poliuretano espanso flessibile, con materiali ecologici ad alto spessore e bassa perdita di portanza per garantire il mantenimento nel tempo dell'elasticità del prodotto.

L'anima del dispositivo è realizzata con un'altra a tre strati di poliuretano espanso di alta qualità e flessibilità unito a una lastra in memory foam ad alta densità, al fine di assicurare un elevato comfort e eliminazione del rischio di decubito dell'utilizzatore.

I materassi sono fabbricati nelle seguenti dimensioni:

Larghezza da cm 80 a cm 180

Lunghezza da cm 190 a cm 200

Incremento della misura pari a 5 cm

Sono disponibili realizzazioni fuori misura su richiesta.

### **5. INSTALLAZIONE E USO**

L'installazione del materasso è estremamente semplice. Una volta ricevuto, togliere l'imballo, verificare l'integrità e posizionare il materasso sopra alla rete del letto.

Per un corretto uso del materasso occorre utilizzarlo come indicato nell'etichetta e ruotare la fodera di rivestimento in base alla stagione (lato estivo - lato invernale).


# Memory

## 6. ETICHETTE

Il materasso è identificato dalla seguente etichetta posizionata sopra al materasso stesso.



L'etichetta è apposta nella posizione indicata in figura:

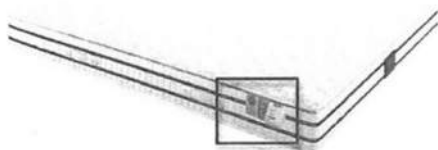

# Memory

## **7. PULIZIA**

Ad intervalli regolari pulite e disinfettate il materasso. Non immergete il materasso in acqua. In caso di uso in ambito ospedaliero/clinico disinfettare e igienizzare il materasso ad ogni cambio paziente. Consigliamo per la fodera il lavaggio a secco e l'asciugatura non a tamburo.

## **8. SMALTIMENTO**

Smaltire il prodotto con i rifiuti urbani e secondo la norma vigente nel proprio comune di residenza.

## **9. GARANZIA**

La Lordflex's garantisce il materasso contro difetti di materiale e di produzione per un periodo di 24 mesi dalla consegna

Nota: ogni tentativo di riparazione, ripristino o modifica del materasso, che esuli da quanto contemplato nel manuale utente, da parte di persona non autorizzata dalla Lordflex's, farà decadere la garanzia.

Per richiedere l'intervento in garanzia, l'acquirente, immediatamente dopo il rilevamento dell'evento riguardante il reclamo, dovrà contattare la Lordflex's per iscritto o telefonicamente.

In nessun caso la Lordflex's sarà responsabile di danni diretti, indiretti, a persone animali od oggetti causati da incuria da parte del cliente.